

# Iskra Medical



## Green FORMER

- Электростимулятор с шестью заложенными программами
- Противоцеллюлитные программы 1 и 2, липидолитическая программа, дренажная программа, ионтофорез и стимуляция тканей
- Шесть отдельных выходов с независимой настройкой силы тока



Нашим специалистам удалось разработать малогабаритный, удобный в использовании и эффективный в терапии аппарат **»GREEN FORMER«**. Его основное назначение - электростимуляция мышц. Под его влиянием кожа, пораженная целлюлитом, постепенно приобретает нормальный вид, нормализуются также тонус кожи и мышц. Заложенные в аппарат разнообразные программы позволяют лечить симптомы различных состояний:

- P1** - противоцеллюлитная программа для терапии III и IV стадии целлюлита (микро- и макронодулы);
- P2** - противоцеллюлитная программа для терапии I и II стадии целлюлита (с преимущественно лимфатическими отеками);
- P3** - липидолитическая терапия для уменьшения жировых накоплений;
- P4** - стимуляция кожи и мышц при помощи венозного и лимфатического дренажа;
- P5** - лимфатический дренаж;
- P6** - MF ионтофорез.

Эффективность аппарата **»GREEN FORMER«** базируется на специфических характеристиках электрических импульсов, входящих в состав отдельных программ:

- Среднечастотная терапия оказывает более глубокое действие благодаря импульсов небольшой ширины;
- Стимуляция происходит очень приятно, без какилибо ощущений боли;
- Максимальный липидолитический эффект достигается с использованием частоты 3 МГц;
- Кровообращение значительно улучшается с использованием частоты 4000 Гц и переменной: полярноотч
- Ритмичная контракция мышц, предусмотренная программой 5, способствует природному дренажу венозной крови и лимфатической жидкости.
- Программа ионтофореза, благодаря особому виду модуляции, гарантирует избежание ожогов.

ПРОГРАММА P1 III и IV СТАДИИ ЦЕЛЛЮЛИТА		
ЧАСТОТА	ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ	СПОСОБ ВОЗДЕЙСТВИЯ
20 Гц	2 минуты	Постоянный
4000 Гц	8 минут	Постоянный
3 Гц	25 минут	Постоянный
20 Гц	10 минут	Ритмичный A:10с P: 6с
Продолжительность процедуры - 45 мин		

ПРОГРАММА P2 III и IV СТАДИИ ЦЕЛЛЮЛИТА		
ЧАСТОТА	ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ	СПОСОБ ВОЗДЕЙСТВИЯ
20 Гц	2 минуты	Постоянный
4000 Гц	5 минут	Постоянный
3 Гц	8 минут	Постоянный
20 Гц	15 минут	Ритмичный A:10с P: 6с
Продолжительность процедуры - 30 мин		

ПРОГРАММА P3 ЛИПИДОЛИЗ		
ЧАСТОТА	ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ	СПОСОБ ВОЗДЕЙСТВИЯ
3 Гц	2 минуты	Постоянный
20 Гц	8 минут	Ритмичный A:10с P: 6с
50 Гц	25 минут	Ритмичный A:10с P: 6с
Продолжительность процедуры - 45 мин		

ПРОГРАММА P4 ТОНИЗАЦИЯ		
ЧАСТОТА	ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ	СПОСОБ ВОЗДЕЙСТВИЯ
1-5 Гц	10 минут	Постоянный
20 Гц	5 минут	Ритмичный A:5с P: 5с
50 Гц	5 минут	Ритмичный A:5с P: 5с
80 Гц	5 минут	Ритмичный A:5с P: 5с
120 Гц	5 минут	Ритмичный A:5с P: 5с
Продолжительность процедуры - 45 мин		

ПРОГРАММА P5 ЛИПИДОЛИЗ		
ЧАСТОТА	ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ	СПОСОБ ВОЗДЕЙСТВИЯ
3 Гц	10 минут	Постоянный
10 Гц	5 минут	Ритмичный A:2с P: 2с
20 Гц	5 минут	Ритмичный A:2с P: 2с
50 Гц	5 минут	Ритмичный A:2с P: 2с
Продолжительность процедуры - 35 мин		

ПРОГРАММА P6 ИОНТОФОРЕЗ		
ЧАСТОТА	ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ	СПОСОБ ВОЗДЕЙСТВИЯ
4000 Гц	15 минут	Постоянный
Продолжительность процедуры - 15 мин		

**Технические данные:**

Тип аппарата: BFGREEN FORMER  
 Сетевое напряжение: 230 В, 50 Гц  
 Потребляемая мощность: 100ВА  
 Тип предохранителей: 2x1,6 АТ  
 Масса аппарата: 6 кг  
 Корпус: полистироловый PS 06  
 Цвет корпус: светло серый  
 Габаритные размеры: 500x410x180 мм  
 Класс безопасности: I

Тип аппликационной части: BF  
 Классификация по MDD 93/42/EEC: IIb  
 Сила электрического тока: 85 mA, регулируемая  
 Основная частота: 4000 Гц  
 Частота пачек импульсов: 1-5 Гц, 3 Гц, 10 Гц, 20 Гц, 50 Гц, 80 Гц, 120Гц  
 Число заложенных программ: 6  
 Продолжительность терапии: 1 - 99 мин., регулируемое  
 Число выходов: 6 отдельных  
 Инструкция по применению

