



Iskra Medical

## Medio SONO Cosmetic

CE 0123

- Терапия ультразвуком частоты 3 МГц
- Два отдельных излучателя для лица и один для тела
- Эффективная терапия от целюлита и морщин на лице
- Способствует прониканию кремов и препаратов глубоко в подкожный слой



Ультразвуковые волны вызывают в теле человека двойной эффект:

- Механический - микромассаж способствует растяжению тканей,
- Тепловой - из-за трения между молекулами выделяется тепло.

Комбинация механического и теплового эффектов приводит к появлению третьего - биологического:

- ускоряются регенеративные процессы во всех слоях кожи,
- происходит растяжение связной ткани,
- улучшается кровообращение
- усиливается проникание препаратов глубоко в подкожный слой.



»MEDIO SONO COSMETIC« с большим успехом используется для:

- ухода за кожей лица
- разглаживания мелких морщин
- втирания косметико-лечебных веществ
- улучшения кровообращения в области лица
- терапии целюлита - для улучшения кровообращения
- для постепенного избавления от некрасивого вида кожи
- для глубокого втирания лечебных веществ.

#### Терапия целюлита:

Лечение целюлита рекомендуется женщинам, у которых ухудшение состояния связной ткани кожи уже привело к заметным изменениям на ее поверхности, к образованию т.н. апельсиновой корки. Ультразвуковой микромассаж способствует растяжению волокон связующей ткани и таким образом улучшает внешний вид кожи. Тепловой эффект ультразвукового массажа усиливает кровообращение во всех слоях кожи. В целях интенсификации процедуры, во время терапии поверхность обрабатываемых участков рекомендуется смазать противоцелюлитным кремом. Для усиления противоцелюлитного эффекта, ультразвуковую терапию целесообразно применять в комбинации с ручным или механическим лимфодренажем.

#### Уход за кожей лица:

Воздействие ультразвуковых волн оказалось весьма успешным при разглаживании мелких морщин, появившихся на лице от усталости, при усилении кровообращения, тонизации связующей ткани и при интенсификации усваивания питательных веществ более глубокими прослойками кожи. Для ухода за кожей лица предназначены три программы. Каждая из программ допускает внесение в нее изменений и дополнений. Большую часть программы занимают действия, направленные на достижение ожидаемого эффекта.

#### Технические данные:

Тип аппарата:	MEDIO SONO COSMETIC	Способ действия:	непрерывный
Сетевое напряжение:	230 В, 50 Гц		импульсный: 16 Гц, 48 Гц,
Потребляемая мощность:	60 ВА		100 Гц (рабочий цикл 20 %)
Масса аппарата:	3,5кг	Продолжительность процедуры:	0-99 мин., регулируемая
Корпус:	полистироловый PS 06	Ультразвуковая интенсивность:	0-2 Вт/см <sup>2</sup> , непрерывно
Цвет корпуса:	белый		0 - 3 В/см <sup>2</sup> , импульсами
Габаритные размеры:	300x300x140 мм	Ультразвуковые излучатели:	3 МГц - большой 5 см <sup>2</sup> — 1 шт.
Защита от перенапряжения:	установлена		3 МГц - малый 1 см <sup>2</sup> - 2 шт.
Класс безопасности:	1	Вариант:	портативный вариант в чемоданчике
Тип аппликационной части:	BF	Габаритные размеры:	270x190x80мм
Классификация по MDD 93/42 EEC:	IIb	Инструкция по применению	
Частота ультразвука:	3 МГц		

