




Iskra Medical

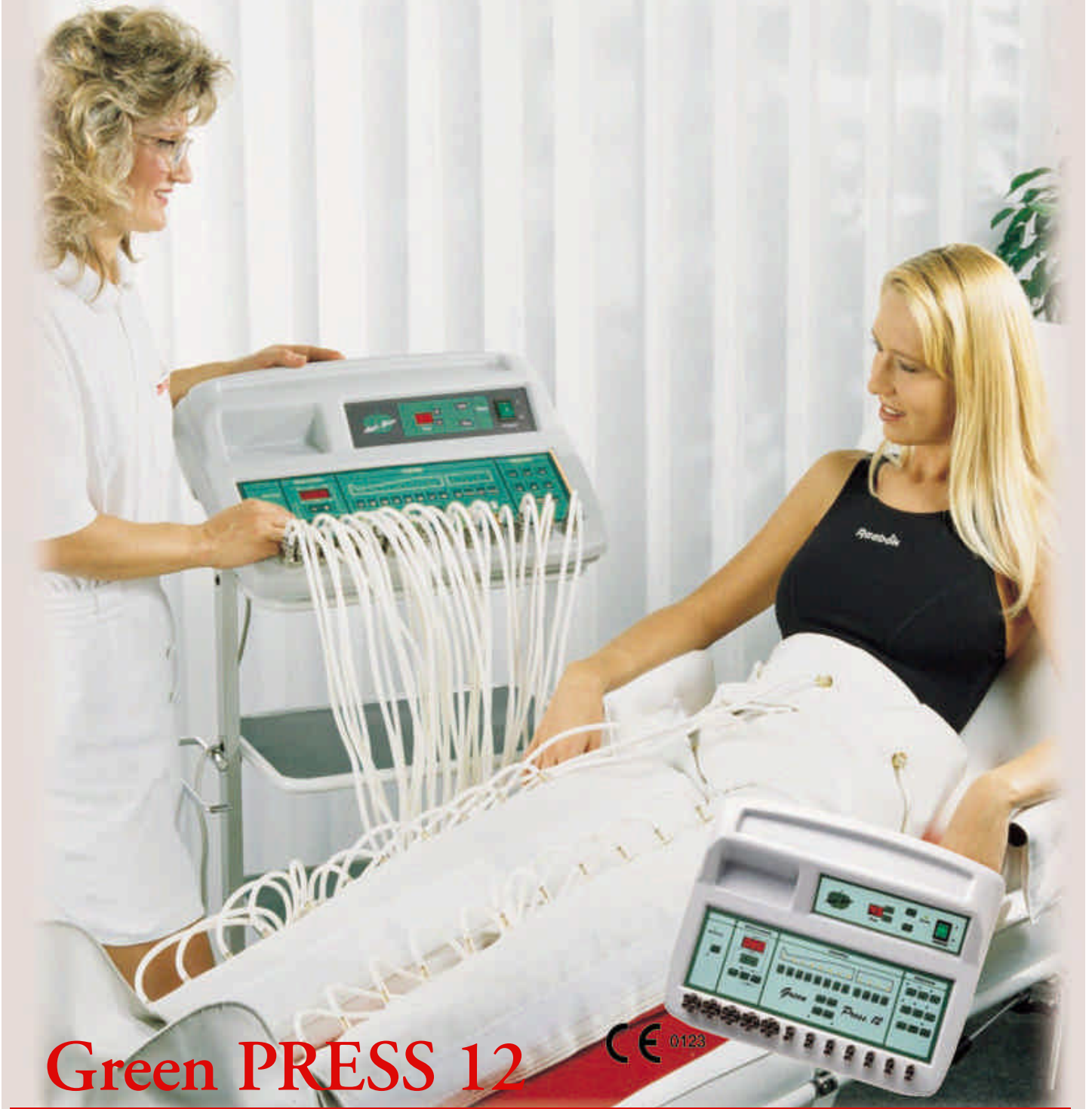

Green PRESS 12

CE 0123

- Аппарат для медицинского или косметического лимфодренажа с 2 x 12 выходами
- Эффективен при устранении лимфатических отеков разного происхождения
- Эффективен при устранении целлюлита и как профилактика при отеках ног и варикозных венах
- Оснащен 7 зафиксированными и 14 регулируемыми программами
- Возможна регулировка параметров дренажа - давления, продолжительности компрессии и паузы, продолжительности процедуры



»Green Press 12« представляет собой современный аппарат с микропроцессорным управлением и с встроенным нагнетающим насосом для подачи воздуха под точно определенным (регулируемым) давлением в изолированные между собой ячейки манжеты. »Green Press 12« имеет несколько зафиксированных, управляемых микропроцессором программ, обеспечивающих различную последовательность заполнения воздухом отдельных ячеек манжеты, а также количество заполненных ячеек и/или манжет. Кроме заложенных в памяти программ, аппарат дает возможность составления собственных программ, которые при необходимости можно либо аннулировать, либо в них вносить изменения. Эти программы могут быть простыми (с предусмотрением одной последовательности заполнения ячеек) или комплексными (с предусмотрением нескольких различных вариантов последовательности заполнения ячеек). Другие параметры программ - давление в манжетах, продолжительность компрессии, продолжительность интервала между компрессиями



и давление в манжете - подлежат индивидуальной настройке, чем обеспечен индивидуальный подход к каждому пациенту. В распоряжении имеются манжеты двух типов. Оба типа манжет состоят из пневматически разделенных ячеек, которые между собой частично перекрываются и тем самым обеспечивают наиболее физиологический способ лимфодренажа. Между собой они отличаются по способу аппликации на пациента и по материалу, из которого они изготовлены. Аппарат оснащен 12 подсоединениями для каждой ячейки манжеты в отдельности. Таким образом обеспечено подключение всех манжет для одновременного лимфодренажа обеих ног, ягодиц и живота. В отдельности можно производить дренаж одной или обеих рук. »Green Press 12« очень прост в применении. Благодаря высокому качеству и профессиональности самой аппаратуры, ее рекомендуют использовать во всех отделах физиотерапии в качестве помощи при ручном лимфодренаже. Терапевтический эффект значителен как в начальной, так и в последней фазе реабилитации. Помимо этого, »Green Press 12« с успехом можно использовать в косметических салонах, которые под руководством специалистов проводят лимфодренаж, который является одним из наиболее эффективных терапевтических методов снижения отложения подкожного жира. В комплексе с другими методами борьбы с ожирением лимфодренаж даст весьма хорошие результаты.

ПОКАЗАНИЯ:

- Медицинские:
- первичный отёк
 - вторичный отёк
 - посттравматический отёк
 - хронический венозный застой
 - варикозные вены и период после операции вен
 - трофические язвы голени
 - профилактика тромбоза вен
- Косметические:
- увеличение веса тела
 - ощущение тяжести в ногах
 - целюлит

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

- * сердечная недостаточность
- цирроз печени
- отёки почечного генеза
- микро- и макроангиопатии при диабете, мб. Бургера, мб. Раинауда
- тромбоз
- туберкулез
- тромбоз
- злокачественные опухоли

Технические данные:

Тип аппарата:	GREEN PRESS 12	включение ячеек
Сетевое напряжение:	230 В, 50 Гц	
Потребляемая мощность:	300 ВА	
Тип предохранителей:	1,6 АТ	- направление массажа
Масса аппарата:	8,2кг	
Масса аппарата вместе с манжетами:	16,7кг	- продолжительность процедуры
Корпус:	полистирол PS 06	Число стандартных массажных программ
Цвет корпуса:	светло серый	Число свободно устанавливаемых программ
Габаритные размеры:	500x410x220 мм	Стандартное оборудование:
Класс безопасности:	I	
Тип аппликационной части:	BF	
Классификация по MDD 93/42/ЕЕС:	IIa	
Число выходов для массажных ячеек:	2x 12	
Давление в манжетах - регулируемое:	0-22 кПа	
Регулируемые элементы массажа:		
- давление в ячейках манжеты	0-22 кПа	
- продолжительность давления	0-90 с	
- интервал включения ячеек	0 — 90 с	
- способ включения ячеек	линейный - поочередный	Дополнительное оборудование:

- отдельный - включение каждой ячейки отдельно
- кольцевой - несколько ячеек одновременно волнами в сторону сердца или в противоположном направлении до 90 мин.
- до 90 мин.
- 7, заложенных в памяти аппарата
- 14
- манжета для ноги - 2 шт.
- манжета для стопы 2 шт.
- манжета для пояса - 1 шт.
- манжета для ягодиц - 1 шт.
- Подсосудипитсль. шнур: 230 В / евроштепсель
- Инструкция по применению
- манжета для руки
- косметическая манжета

